

NOUVEAU!




roeko

Surgitip CANULES D'ASPIRATION

La famille de canules idéale pour une aspiration
précise en chirurgie et en endodontie

COLTENE

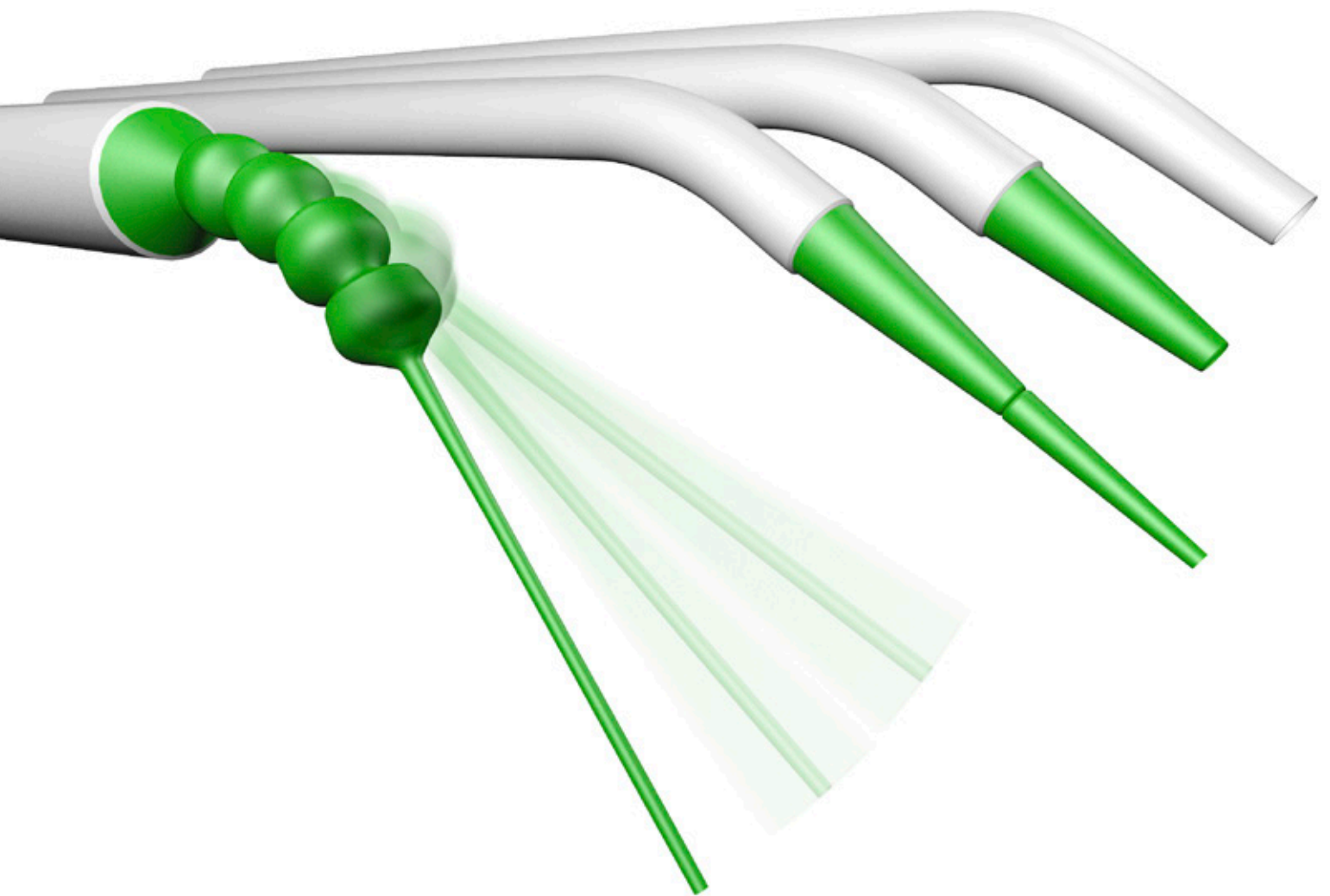

roeko

Surgitip Les canules d'aspiration Surgitip sont des auxiliaires éprouvés pour assurer le séchage du champ opératoire buccal lors d'interventions peu invasives et pour aspirer des particules. Les canules en plastique permettent une aspiration extrêmement précise, car leur forme et leur conception sont spécialement développées pour le travail sous le microscope ou la loupe. Les canules conviennent en outre par leur maniement hygiénique et simple.

- Aspiration précise grâce à la pointe verte qui se distingue clairement
- Aucune gêne à la visibilité grâce à la forme longue et fine et à la pointe conique
- Utilisation hygiénique et peu chronophage car les canules sont emballées individuellement et sont immédiatement prêtes à l'emploi
- Différents diamètres de l'orifice d'aspiration pour un large spectre de traitement


roeko Surgitip-endo

NOUVEAU!

Surgitip-endo est une canule d'aspiration spécialement conçue pour le séchage du canal radiculaire. Son design innovant sphérique lui confère une mobilité tridimensionnelle unique. Cette flexibilité permet d'atteindre même les canaux radiculaires difficiles d'accès sans courber l'embout canalaire. La puissance d'aspiration reste élevée et la visibilité du champ opératoire parfaite.

Surgitip-endo aspire rapidement et efficacement les solutions de rinçage et l'humidité du canal radiculaire. Il en résulte une réduction considérable du temps de séchage final du canal ainsi que du nombre de pointes de papier utilisées. Ces dernières sont simplement utilisées pour le contrôle final du séchage.

- Pointe à mobilité tridimensionnelle avec design innovant
- Puissance d'aspiration optimale grâce à l'accès garanti au canal radiculaire
- Embout canalaire ISO 60, diamètre intérieur 0,35 mm
- Fabriqué en salle blanche en conformité avec la norme EN ISO 14644

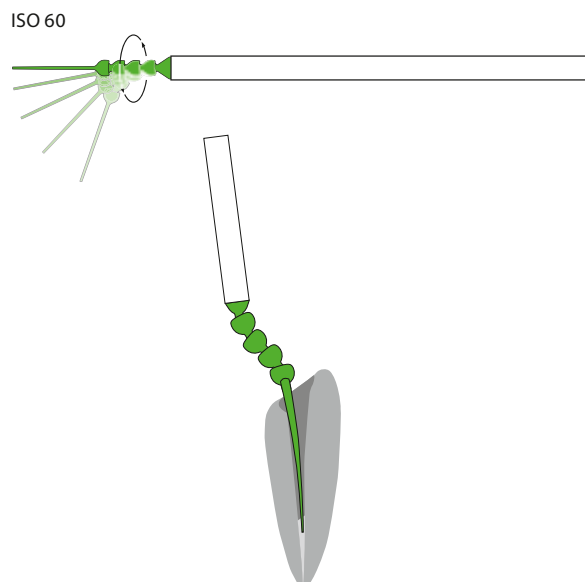

roeko Surgitip-micro

Surgitip-micro offre, avec son orifice d'aspiration de 1,2 mm, capacité d'aspiration et précision lors d'interventions microchirurgicales. La canule tient bien en main, est facile à guider, ce qui permet d'effectuer sans difficulté une aspiration ciblée même dans l'étroit champ opératoire buccal. Surgitip-micro est stérile, emballée individuellement et immédiatement prête à l'emploi.



roeko Surgitip

La canule Surgitip est utilisée pour des interventions chirurgicales qui exigent une grande capacité d'aspiration. Elle est disponible avec un orifice d'aspiration de 2,5 mm et de 4,8 mm. La canule de 4,8 mm se compose d'un tuyau de canule courbe sans pointe verte. Surgitip est stérile, emballée individuellement et immédiatement prête à l'emploi.



roeko Canules d'aspiration

Les canules d'aspiration non stériles conviennent à l'aspiration lors d'intervention non chirurgicales. Leur forme et leur longueur correspondent à celles de la canule stérile Surgitip 4,8 mm. Les canules d'aspiration sont disponibles non emballées en pack de 100.




roeko Double adaptateur

Avec le double adaptateur, chaque canule d'aspiration ROEKO peut être raccordée aux installations d'aspiration possédant un orifice de branchement d'un diamètre de 11 ou de 16 mm. Le double adaptateur est réutilisable et stérilisable en autoclave et en chemiclave à une température allant jusqu'à 134°C.


ø 11 mm

ø 16 mm

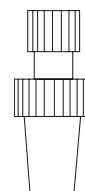

roeko Concorde II

Pour l'aspiration universelle, nous recommandons la canule Concorde II. Avec cette canule en plastique, on peut écarter en douceur langue et joues et aspirer d'importants volumes. La canule fabriquée en plastique de haute qualité est réutilisable et stérilisable en autoclave et en chemiclave à une température allant jusqu'à 134°C.

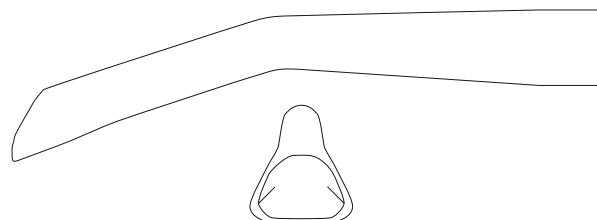

INFORMATIONS DE COMMANDE

	Ø Orifice d'aspiration	Ø Orifice de branchement	Contenu	REF
Surgitip-endo	0,35 mm	6,5 mm	20 pcs. *	6001 8280
Surgitip-micro	1,2 mm	6,5 mm	20 pcs. * 100 pcs. **	462 012 462 013
Surgitip	2,5 mm	6,5 mm	20 pcs. * 100 pcs. **	462 025 462 026
	4,8 mm	6,5 mm	20 pcs. * 100 pcs. **	462 048 462 049
Canules d'aspiration	4,8 mm	6,5 mm	100 pcs. *	461 048
Concorde		11 mm 16 mm	10 pcs. *** 10 pcs.	450 211 450 216
Adaptateur		11 mm 16 mm	1 1	463 025 463 011
Double adaptateur		11 + 16 mm	1 Set	463 000

* 1 Double adaptateur inclus | ** 5 Double adaptateur inclus | *** 1 Adaptateur inclus



© 2015 Coltene/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltene/Whaledent S.a.r.l.

75 Boulevard Marie et
Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 02 / France
Tél +33 2 43 39 30 30
Fax +33 2 43 39 30 40
info.fr@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE